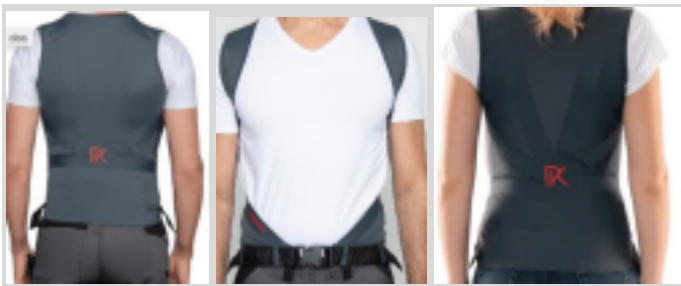


Fiche technique LYNE PRO

	LYNE PRO
Photo	
Type de vêtements	Gilet
Composition	78% polyamide, 22% elastane
Poids	250g
Type de Tenseur	Elastique (250g)
Force du Tenseur	Fort, Force 3
Autre	Double boucle de fermeture Grande sangle de hanche Bouton-pression de ceinture
Créés pour	Emplois opérationnels, travaux professionnels ou occasionnels sollicitant le dos.
Packaging	Carton

	LYNE PRO
Objectifs	- Protège le dos durant l'effort (adoptez la bonne posture. - Réduire la fatigue générale. - Réduire le risque de blessure (au dos) en adoptant la bonne posture.

Guide des tailles :

FEMME :



HOMME:



	LYNE PRO
Usage prévu	La technologie LYNE vise à soutenir les muscles de la colonne vertébrale et à maintenir la mobilité des articulations et le tonus musculaire en utilisant le principe de l'autocorrection.
Condition médicale / application prévue	Mal de dos mécanique ou prévention ou mal de dos.
Contre-indications	- Une pathologie entraînant une faiblesse articulaire, tendineuse et osseuse du tronc et du membre supérieur - Une maladie inflammatoire aiguë et/ou entorse d'une ou plusieurs articulations du membre supérieur ou du tronc. - Une fracture tassement d'une ou plusieurs vertèbres de moins de 3 mois ou non consolidée. - Une arthropathie Dégénérative - La maladie de Paget - Une sténose du canal radiculaire - Une spondylarthrite ankylosante - Une opération chirurgicale récente, non cicatrisée du tronc ou du membre supérieur. - Une rupture tendineuse ou ligamentaire, partielle ou complète, des membres supérieurs ou du tronc, de moins de 2 mois. → En cas de doute contactez notre expert santé à l'adresse pro@percko.com <u>Précautions d'usage</u> Demandez l'avis de votre médecin en cas de: - Grossesse - Ostéoporose
Precautions	• ATTENTION: Les produits LYNE doivent être lavés en machine à 30° avant la première utilisation. • Tenir les produits LYNE à l'écart du feu ou d'une source de chaleur importante ou d'une source électrique à haute tension. • Ne serrez pas trop fort les sangles pour éviter de créer un effet de garrot. • Portez la partie du produit couvrant la taille sur le dessus d'un sous-vêtement ordinaire pour éviter d'abîmer la peau en raison du positionnement de la bande antidérapante. • En cas d'inconfort, d'irritation, enlevez le produit et consultez le service clientèle. • Stockez et conservez les produits LYNE à température ambiante, loin de toute source de chaleur et de préférence dans leur emballage d'origine. • Pour des raisons de performance et d'hygiène, ne laissez pas les produits à d'autres

	clients.
Avertissement	• N'exposez pas les produits à une source de chaleur importante. • Ne pas porter les produits à proximité d'un feu ou d'un solvant. • Ne pas porter les produits LYNE pour aller nager ou pratiquer un sport aquatique.
Entretien	• Reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions d'entretien. • Laver en machine à 30°, programme doux ou synthétique, de préférence à l'aide d'un sac de lavage. • N'utilisez pas de détergents, d'assouplissant autre que la lessive classique et de produits agressifs tels que le chlore. • Essorage à 700 tours/minute. • Laissez sécher à l'air libre, à l'abri de toute source de chaleur.
Domaine d'application	Emplois actifs et contraignants qui sollicitent particulièrement le dos.
Population cible	Tout utilisateur effectuant des travaux lourds professionnels/ occasionnels avec des mouvements/ tâches répétitifs, des vibrations et qui peut souffrir de tensions ou de douleurs dans la colonne lombaire, thoracique, vertébrale ou de tendinopathies des épaules ou des membres supérieurs liées à la position du dos.
Durée d'utilisation ou de contact avec le corps	A utiliser durant l'effort
Nombre maximum d'utilisations	Jusqu'à 200 Lavages
Partie du corps en contact avec le produit	Aucune, Le produit est porté au-dessus des vêtements.